


#### ADIM 4 – Gönderme


1. Katılımcı Bilgileri formunu doldurun.

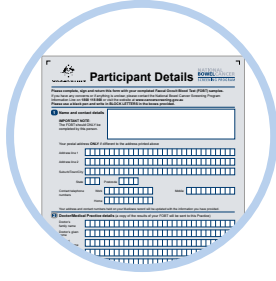

2. Ödemeli zarfın arkasına adınızı ve adresinizi yazıp ön kısmı imzalayın.



3. Katılımcı Bilgileri formunu ve iki toplama tüpünü (kilitli torba içinde) Ödemeli Zarfa yerleştirip ağzını kapatın.

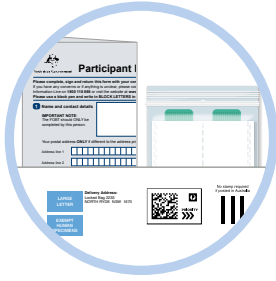

4. Zarfı **24 saat içerisinde** bir postaneye götürün ya da Avustralya Posta kutusuna **ikindinin ilerleyen saatlerinde (18:00'den önce)** atın.



Numuneler soğukta tutulmalıdır, bu yüzden araba gibi sıcak bir yerde bırakmayın.

#### ? Sorular

Testin nasıl yapılacağı hakkında sorularınız varsa Test Seti Yardım Hattını **1800 930 998** numaralı telefondan arayın (Pazartesi'den Cumaya 7:30 - 22:00 AEST/AEDT arası ve Cumartesi - Pazar 9:00 - 19:00 AEST/AEDT arası) ya da **www.cancerscreening.gov.au/bowel** adresindeki kısa videoyu izleyin

#### Çeviriler

Kendi dilinizde bilgi almak için [www.cancerscreening.gov.au/translations](http://www.cancerscreening.gov.au/translations) adresini ziyaret edin veya **13 14 50** numaralı telefondan **Translating and Interpreting Service'ı (Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmeti)** arayın.

#### Sonucunuz

Sonucunuz siz numuneleri gönderdikten birkaç hafta sonra size ve (belirtildiyse) doktorunuza postayla gönderilecektir.



Australian Government

**NATIONAL  
BOWELCANCER**

SCREENING PROGRAM

# Evde Test Seti Talimatlar

#### PATOLOJİ HİZMETLERİ



**SONIC  
HEALTHCARE**

Quality is in our DNA

#### SPONSOR

**r-biopharm**



34 WOODFIELD BOULEVARD CARINGBAH NSW 2229

#### ÜRETİCİ



**EIKEN CHEMICAL CO., LTD.**

[www.cancerscreening.gov.au](http://www.cancerscreening.gov.au)

Hayatınızı  
kurtarabilecek 4  
kolay adım.

**Test Seti Yardım Hattı  
1800 930 998**

[www.cancerscreening.gov.au](http://www.cancerscreening.gov.au)

***“Test biraz sevimsiz gelebilir, ama temiz ve kolay olup hayatınızı kurtarabilir. Tuvalete yalnızca iki defa gitmeniz ve numuneleri postaya vermeniz yeterlidir.”***