



Australian Government

NATIONAL BOWELCANCER SCREENING PROGRAM

Ürün adı

Ulusal Barsak Kanseri Tarama
Programı Seti

Pataloji Servisi



İçine örnekleri koyduğunuz 'Mavi Zarfı'
şu adrese postalayın:

Reply Paid 83974
Dorevitch Pathology
FOBT Department
PO Box 5018
Heidelberg West MDC VIC 3081

Sponsorluk:

NEW HEMTUBE (B)

SIEMENS

Üretici firma:

NEW HEMTUBE (B)

FUJIREBIO INC.

FOBT002 Version 12/12

NATIONAL BOWELCANCER SCREENING PROGRAM



Australian Government

Test İçin Gerekli Örnekleri Nasıl Alırsınız?

ÖRNEKLERİN SAKLANMASI

- ▶ Örneklerinizi koyacağınız Mavi Posta Zarfları 2 ile 10 derece arasında saklayın. Buzdolabı, örnekleriniz için en iyi yerdir.

Aşağıdakileri yapmayın:

- ▶ Beslenme düzeninizi veya ilaçlarınızı değiştirmeyin
- ▶ Örneklerinizi dondurmayın.

Aşağıdaki durumlarda örnek almayın:

- ▶ Kanamakta olan hemoroidler (basurlar) varsa.
- ▶ Adet kanamalarınızdan önceki ve sonraki 3 gün içerisinde.
- ▶ İdrarınızda veya dışkıınızda kan varsa – bu durumda doktorunuzla başvurmalısınız.
- ▶ Yakında kolonoskopi olmak üzere randevunuz varsa.
- ▶ Geçmiş 12 ay içinde halen tedavi görmekte olduğunuz bir barsak rahatsızlığınız olduysa – emin değilseniz doktorunuza danışın.

İki örnek almak için 4 kolay işlemi yapmadan önce lütfen bütün sayfaları okuyun.

Hızlı ve kolay, kendi evinizde size uygun bir zamanda yapılabilir

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Pazartesi – Cuma günleri, saat
09:00 ve 17:00 arasında (Avustralya
Doğu Yakası Standart Saati)
1800 738 365'ı arayın

İngilizce okumak zor mu geliyor?


Bizi 13 14 50'den arayın.

- ▶ **MAVİ ÇUBUĞU** kullanın
- ▶ İdrarınızı yapın ve sifonu çekin.
- ▶ Örnek Toplama Kâğıdını, baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde tuvaletin içinde yüzdürün.
- ▶ Tuvalete oturun ve dışınızı kâğıdın üzerine yapın.
- ▶ Örnek toplama kâğıtları sifon çekildiğinde herhangi bir tuvalet sistemini etkilemeyecektir.
- ▶ **MAVİ ÇUBUĞUN** ucunu dışıya batırıp bir pirinç tanesinden **daha büyük olmayan** bir parçayı çubuğun ucunda görünceye kadar batırıp çıkartmaya devam edin.




- ▶ **MAVİ ÇUBUĞU** tamamen Örnek Toplama Tüpünün içine sokun ve tüpün klik sesi çıkartarak kapandığından emin olun.
Eğer Örnek Toplama Tüpündeki sıvının içine hiç dışkı gitmemiş gibi görünse de endişelenmeyin.
- ▶ **ÖNEMLİ > MAVİ ÇUBUĞU** Örnek Toplama Tüpü'ne yerleştirdikten sonra geri çıkartmayın.

- ▶ İsminizi, 'Doğum Tarihinizi' ve 'Örnek Tarihi' bilgilerini etikete yazıp Örnek Toplama Tüpünün etrafına yapıştırın.
- ▶ Örnek Toplama Tüpünü vida kapaklı Taşıma Tüpüne yerleştirin.

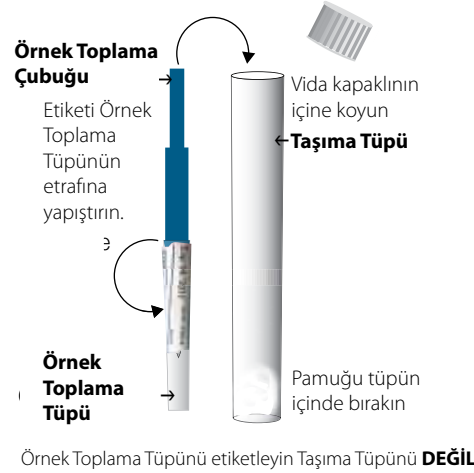

- ▶ Kapağı vidalayarak kapatın ve ağız fermuarlı çantaya yerleştirin. Ağızını kapatın.
- ▶ Fermuarlı çantayı mavi Posta Zarfına koyun.
- ▶ **ÖNEMLİ >** Mavi Posta zarfını örneklerinizin 2 ile 10 derece arasında durmasını sağlamak için buzdolabında saklayın.
- ▶ **ÖNEMLİ >** Dondurmayın.

- ▶ **KIRMIZI ÇUBUĞU** kullanın.
- ▶ İkinci örnek tercihan 2 veya 3 gün içinde alınmalıdır. Eğer isterseniz ikinci örneği aynı gün daha sonraki bir zamanda da alabilirsiniz.
- ▶ "1. İlk Örneğinizi Alma" ve "2. Örneğinizi Etiketlemek ve Saklamak" bölümlerinde anlatılan adımların aynısını tekrar edin.
- ▶ Bu Taşıma Tüpünü de fermuarlı çantaya ve daha sonra diğer Tüple beraber Mavi Posta çantasına yerleştirin.

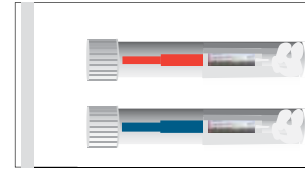

- ▶ **ÖNEMLİ >** Zarfı postaya atana kadar, 2 ile 10 derece arasında bir soğuklukta saklamaya devam edin.
- ▶ **ÖNEMLİ >** Dondurmayın.

- ▶ Mavi Posta Zarfının ön yüzünde, "Gönderenin imzası" yazan yeri imzalayın.
- ▶ Mavi Posta Zarfının arka yüzünde, "Gönderenin Adı" ve "Gönderenin Adresi" yazan yerleri doldurun.

Posta ücreti ödenmiş olan mavi Posta Zarfına koyun:

- ▶ **ÖNEMLİ >** NBCSP kutusunun geldiği büyük zarfta bulunan Katılımcı Bilgileri Formu'nu imzalayıp tarih atın.
- ▶ Vida kapaklı Taşıma Tüpleri içine yerleştirilmiş olan iki etiketli Örnek Toplama Tüpünün olduğu çantanın ağızındaki fermuarı kapatın
- ▶ Tamamlanmış testleri mümkün olan en kısa zamanda postaya atın.
- ▶ Posta Zarfını postaya atmaya giderken onu kuru ve serin tutun (25 derecenin altında)

Mavi Posta Zarfını bir Avustralya Posta Merkezinden yollayın.

Eğer bu mümkün değilse, bir Avustralya Post posta kutusuna atın.